

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8

Secondaria di primo grado Guinizelli, via Ca' Selvatica 11
 Primaria Armandi avogli via Saragozza, 238
 Primaria Luigi bombicci, via Filippo Turati, 84
 Infanzia Manzolini, via S. Isaia, 18
 Primaria Manzolini, via S. Isaia, 16
 Primaria XXI Aprile 1945, via XXI Aprile 1945, 24
 Bologna

**ALLEGATO 01: PROCEDURA PER IL CORRETTO
 UTILIZZO DEL TERMOMETRO AD INFRAROSSI –
 Rev. 00 del 03/09/2021**

1. RESPONSABILE ATTUAZIONE PROCEDURA

NOMINATIVO	RUOLO/MANSIONE	FIRMA presa visione

2. STRUMENTAZIONE: Termometro a infrarossi per misura frontale di temperatura

3. MISURE PRECAUZIONALI

1. Prima di misurare la temperatura con termometro ad infrarossi, adottare la buona prassi di lasciare ambientare il dispositivo nell'ambiente di utilizzo, normalmente sono sufficienti 15 minuti.
2. I termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano conservati lontano da telefoni cellulari e che non siano esposti alle alte temperature, luce diretta del sole, in ambienti con elevata umidità
3. Il dispositivo deve essere utilizzato solo come stabilito dal manuale di istruzioni. In caso contrario, si possono verificare situazioni di pericolo.
4. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate
5. Prima dell'uso, verificare che la struttura sia integra e non presenti nessun tipo di danno.
6. Prima di avvicinarsi alla persona a cui misurare la temperatura
 - richiedere alla persona che deve essere controllata di indossare una mascherina anche di tipo chirurgico (ove indossi una mascherina di comunità)
 - indossare mascherina chirurgica, guanti ovvero sanificare le mani con gel idroalcolico e, se del caso (es. rilevazione di temperatura a persona sospetta che manifesta sintomi) anche occhiali o schermo protettivo
7. Nel misurare la temperatura cercare di mantenere la maggiore distanza possibile allungando il braccio: sostenere sempre il dispositivo per l'impugnatura
8. Non guardare mai direttamente in raggio laser e direzionare esclusivamente alla fronte
9. La persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario a rilevare la temperatura
10. Evitare di toccare con il termometro la persona controllata
11. Pulire il dispositivo con un panno di cotone inumidito e se necessario con un prodotto detergente leggero. Non usare prodotti abrasivi o solventi.

4. MODALITÀ OPERATIVE

Segue estratto del manuale di istruzione.